

EMOFIX[®]

BG

Маз кръвоспираща бариера

Прочетете внимателно листовката с указания, преди да използвате продукта

1. Какво представлява EMOFIX[®] и за какво служи

EMOFIX[®] е кръвоспираща маз, която действа като бариера за ограничаване и превенция на кръвоизливи на кожата и лигавиците, като например: значими, леки или травматични епистаксиси, малки кожни наранявания и др.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате EMOFIX[®]

Не използвайте продукта в случай на свръхчувствителност към съставките му, ако ви е известна такава (виж точка б).

3. Как да използвате EMOFIX[®]

Ограничаване на кръвоизлива: Нанесете достатъчно количество от мазта за покриване на засегнатото място.

Профилактика на рецидивирещи епистаксиси: Прилагайте продукта два пъти на ден за поне две седмици след случаи на остри епизоди или по лекарско предписание.

При приложение на продукта върху носната лигавица, се препоръчва използването на канюлата апликатор, намираща се в опаковката.

Почиствайте старателно канюлата след всяко прилагане и избягвайте безразборната ѝ употреба.

4. Предупреждения

- В случай на нежелани реакции, прекъснете употребата на продукта и се консултирайте с лекар.
- През първите дни на лечение, при използване могат да се появят парене, сърбеж на носа и ринорея, които обикновено изчезват по време на лечението. Ако продължават, прекратете употребата на продукта и се консултирайте с лекар.
- Не използвайте продукта ако опаковката не е цялостна или е подправена/ например преетикетирана/. Подправянето и/или нарушената цялост на опаковката могат да компрометират изискванията за безопасност на продукта.
- Не използвайте този продукт след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката. Посоченият срок на годност се отнася за продукт с цялостна опаковка и правилно съхраняван.

5. Как да съхранявате EMOFIX[®]

- Съхранявайте EMOFIX[®] далече от погледа и от достъпа на деца.
- Затворете добре тубичката след употреба.
- Съхранение при температура не по-висока от 30 °C. В случай на излагане на различни температури от посочената, продуктът може да претърпи изменения в консистенцията, без това да доведе до никаква промяна на качеството му. Достатъчно е да държите EMOFIX[®] на стайна температура, за да си възвърне първоначалната консистенция.

6. Друга информация

Състав: смес от наситени мастни киселини, протеинов екстракт от мая, фосфатидилхолин, витамин Е ацетат, пчелен восък, соево масло, стеарилов алкохол, калциев, калиев и магнезиев хлорид, глицерил моностеарат, метилов и етилов парахидроксibenзоат, БХТ.

Опаковка

Тубичка от 30g с канюла апликатор.

Вносител:

Ди Ем Джи България ЕООД, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Илка Попова №2, вх.Б, ет.5, ап.16
www.dmgbg.com

Опаковка, предназначена за пазара в България.

Произведено в Италия



DMG Italia srl
via Laurentina Km. 26,700
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgit.com



30FG031 2-28/02/2023

Редакция: 09/2019